

洗浄

除菌

アルカリ
性

器具の
浸漬洗浄

器具の
超音波洗浄

バキューム
洗浄

3つの用途の洗剤を

1つにまとめられます！

防錆剤配合



5kg

×4本

歯科用器具・
バキューム用洗剤

MedShine

デンタルマルチクリーナー



スタッフの
教育が楽

3つの用途の洗剤を1つにまとめられるため、用途別に洗剤を覚える必要が無く、**スタッフの教育が楽**になります。

洗剤の
管理が楽

洗剤の種類を集約できるため、**洗剤の管理が楽**になり、集約により、**在庫スペースも削減**できます。

高濃度タイプ
で経済的

独自の技術で濃縮、薄めて使用出来ます。**薄めても洗浄力があり、経済的**です。

ポイント

3つの用途の希釈倍率をすべて50倍に統一することが可能です。
※汚れに応じて希釈倍率を変えることも出来ます。

希釈倍率をすべて50倍統一で
洗浄作業を効率化

洗浄力試験

試験方法：

50倍希釈した試験液に洗浄インジケーター*（TOSI製）を浸漬させ、超音波洗浄機を用いて180秒間超音波をかけた。

洗浄力を以下の基準で評価した。

◎：80%以上汚れを除去 ○：50%以上汚れを除去
△：30%以上汚れを除去 ×：汚れの除去率が30%以下


*血液を想定したモデル汚れを塗布した試験片



消泡試験

試験方法：

50倍希釈した洗浄液を5mLを室温にて、1分間激しく振とうさせた後、泡立ちの経時変化を観察した。

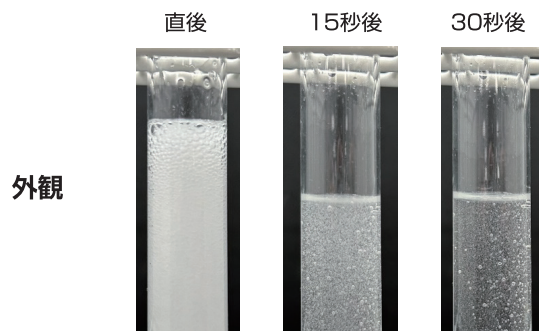


防錆性試験

試験方法：

試験片を50倍希釈した試験液に全浸漬し、室温で3日後の影響を以下の基準で評価した。


—：全く変化なし ±：ごくわずかな変化 +：明らかな変化 ++：顕著な腐食

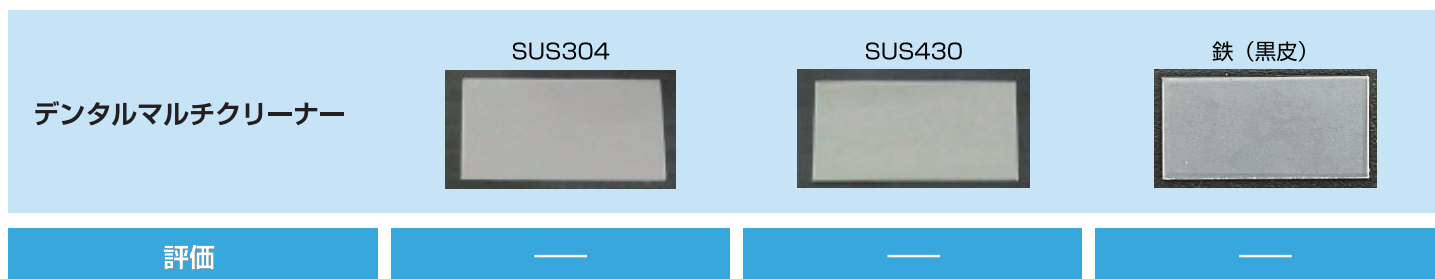

使用方法

バキューム・排唾管洗浄

- 使用量の目安：20～50倍希釈
(本剤20mL～50mL/1L)

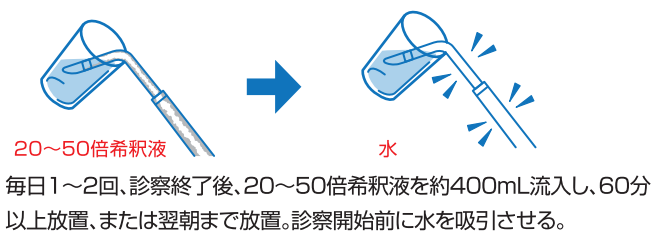

浸漬洗浄

- 使用量の目安：50倍希釈
(本剤20mL/1L)

50倍希釈液で30分以上浸漬させる。

超音波洗浄

- 使用量の目安：50～100倍希釈
(本剤10mL～20mL/1L)

50～100倍希釈液で10～15分洗浄する。

商品データ

品名	メドシャイン デンタルマルチクリーナー 5K
荷姿	5kg×4本/ケース
商品寸法*	206mm×132mm×293mm
ケース寸法	424mm×282mm×297mm
積重可能段数	3段
商品コード	295630
JANコード	4975657236279
ITFコード	14975657236276

成分表示など

液性	アルカリ性
成分	界面活性剤(脂肪酸カリウム)、 溶剤、金属イオン封鎖剤、 アルカリ剤(水酸化カリウム)、 除菌剤、防錆剤

小分けツール(別売り)

品名：5Lソフトボトルポンプ(バネ無し) 10mL
商品コード：900180



品名：出し口(バラ)
商品コード：901209



* 寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。

・ 商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

BD0CBH