

業務用 歯科用吸引システムパウダー汚泥洗浄剤

塩素系

アルカリ性

液体

MedShine パウダークリーナー

分離機・配管の詰まり・
吸引力低下・臭い対策に



2.5
L

詰まりを予防

分離機詰まりの原因となる配管内・分離機内部の汚れを分解し、強力で除去。配管詰まりによるトラブルを未然に防ぎます。

※吸引力低下が配管内・分離機内の汚れに起因する場合、改善効果が期待されます


臭いを抑制

配管および分離機内に蓄積し、臭いの原因となりやすい汚れを除去することで、内部から発生する臭いを軽減します。

洗浄時間を短縮

受け網などユニット内部の汚れが落としやすくなり、日常のお手入れや洗浄作業の時間短縮に貢献します。また、染め出し液などの着色汚れにも高い洗浄力を発揮。

洗浄力試験

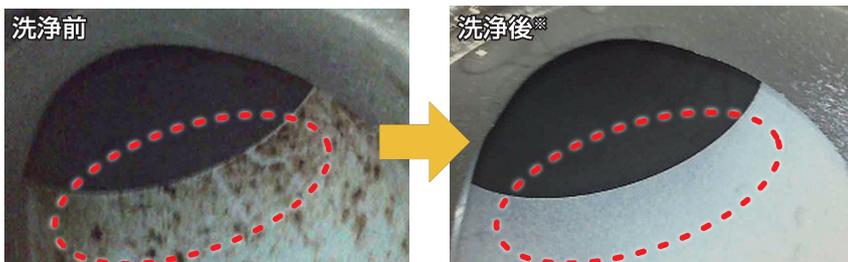


吸引システムの配管内に汚れが蓄積し、黒ずみが確認される。

※20倍希釈液を継続使用(1カ月後の画像) 黒ずみが除去されている。

使用方法

歯科用吸引システム・分離機の洗浄と消臭

● 使用量の目安: 20倍希釈

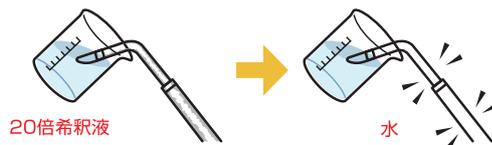

毎日1~2回、診療終了後に、20倍希釈液(洗剤20mlを水400mlで希釈)をユニットの吸引管から吸引する。汚れの程度に応じて10~30分放置し、その後すぐのため水を400ml吸引する。

商品データ

品名	メドシャイン パウダークリーナー 2.5L
荷姿	2.5L×6本/ケース
商品寸法*	105mm×141mm×272mm
ケース寸法*	442mm×233mm×278mm
積載可能段数	3段
商品コード	224963
JANコード	4975657436464
ITFコード	14975657436461

成分表示など

◆液性	アルカリ性
◆成分	カルボン酸塩、水酸化ナトリウム、水酸化カルウム、塩素系漂白剤

小分けツール(別売り)



品名: 出し口(バラ)
商品コード: 901209

※寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。
※商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

お問い合わせは・・・



〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10
TEL・06-6395-2717