

器具の  
浸漬洗浄 器具の  
超音波洗浄

バキューム  
洗浄

洗浄 除菌 アルカリ性

# 3つの用途の洗剤を 1つにまとめられます!

防錆剤配合



5kg × 4本

歯科用器具・  
バキューム用洗浄剤

MedShine

デンタルマルチクリーナー



動画はこちら

スタッフの  
教育が楽

3つの用途の洗剤を1つに  
まとめられるため、用途別  
に洗剤を覚える必要が無く、  
**スタッフの教育が楽**になります。

## ポイント

3つの用途の希釈倍率をすべて50倍に統一することが可能です。  
※汚れに応じて希釈倍率を変えることも出来ます。

洗剤の  
管理が楽

洗剤の種類を集約できるた  
め、**洗剤の管理が楽**になり、  
集約により、在庫スペース  
も削減できます。

高濃度タイプ  
で経済的

独自の技術で濃縮、薄めて  
使用出来ます。薄めても洗  
浄力があり、経済的です。

希釈倍率をすべて50倍統一で  
**洗浄作業を効率化**

## 洗浄力試験

試験方法：  
50倍希釈した試験液に洗浄インジケーター\*（TOSI製）を浸漬させ、  
超音波洗浄機を用いて180秒間超音波をかけた。  
洗浄力を以下の基準で評価した。


○：80%以上汚れを除去 ○：50%以上汚れを除去  
△：30%以上汚れを除去 ×：汚れの除去率が30%以下

\*血液を想定したモデル汚れを塗布した試験片



## 消泡試験


試験方法：  
50倍希釈した洗浄液を5mLを室温にて、1分間激しく  
振とうさせた後、泡立ちの経時変化を観察した。

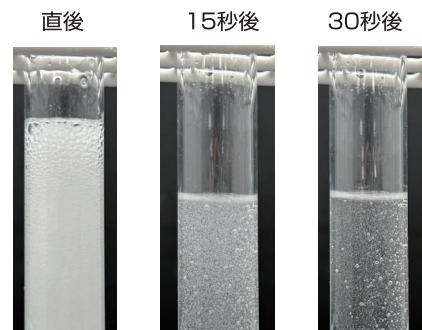

## 防錆性試験

試験方法：  
試験片を50倍希釈した試験液に全浸漬し、室温で3日後の影響を以下の基準で評価した。

—：全く変化なし 土：ごくわずかな変化 +：明らかな変化 ++：顕著な腐食

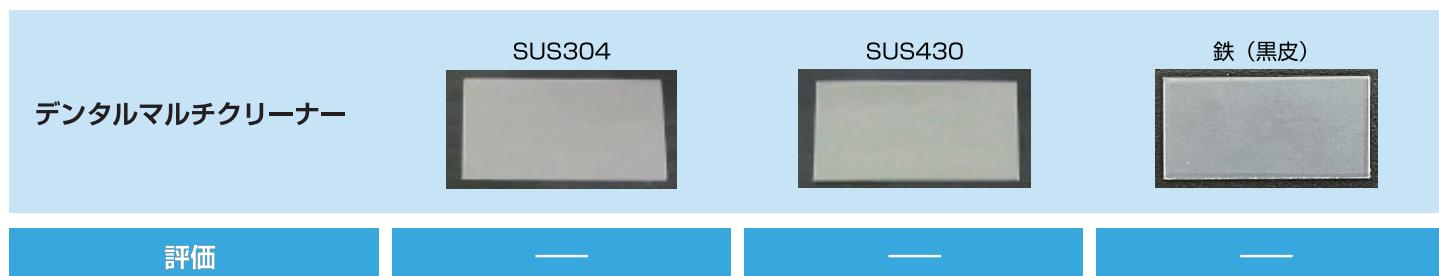

## 使用方法

### バキューム・排唾管洗浄

- 使用量の目安：20～50倍希釈  
(本剤20mL～50mL/1L)



毎日1～2回、診察終了後、20～50倍希釈液を約400mL流入し、60分以上放置、または翌朝まで放置。診察開始前に水を吸引させる。

### 浸漬洗浄

- 使用量の目安：50倍希釈  
(本剤20mL/1L)

50倍希釈液で30分以上  
浸漬させる。

### 超音波洗浄

- 使用量の目安：50～100倍希釈  
(本剤10mL～20mL/1L)

50～100倍希釈液で10～15分  
洗浄する。

## 商品データ

品名	メドシャイン デンタルマルチクリーナー 5K
荷姿	5kg×4本/ケース
商品寸法*	206mm×132mm×293mm
ケース寸法	424mm×282mm×297mm
積重可能段数	3段
商品コード	295630
JANコード	4975657236279
ITFコード	14975657236276

## 成分表示など

液性	アルカリ性
成分	界面活性剤(脂肪酸カリウム)、 溶剤、金属イオン封鎖剤、 アルカリ剤(水酸化カリウム)、 除菌剤、防錆剤

## 小分けツール(別売り)

品名：5Lソフトボトルポンプ(バネ無し)10mL  
商品コード：900180



品名：出入口(バラ)  
商品コード：901209



\*寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。

・商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

お問い合わせは…



〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10

TEL・06-6395-2717

BDOIOF